


1.1. Замена тefлонового покрытия

Чтобы отклеить старый тefлон нагрейте его феном, старый клей не оттирайте
прям на него клейте новый тefлонированный скотч.

Скотч бывает черный и коричневый.

Для коричневого:

разворачиваем рулончик тefлонового скотча,

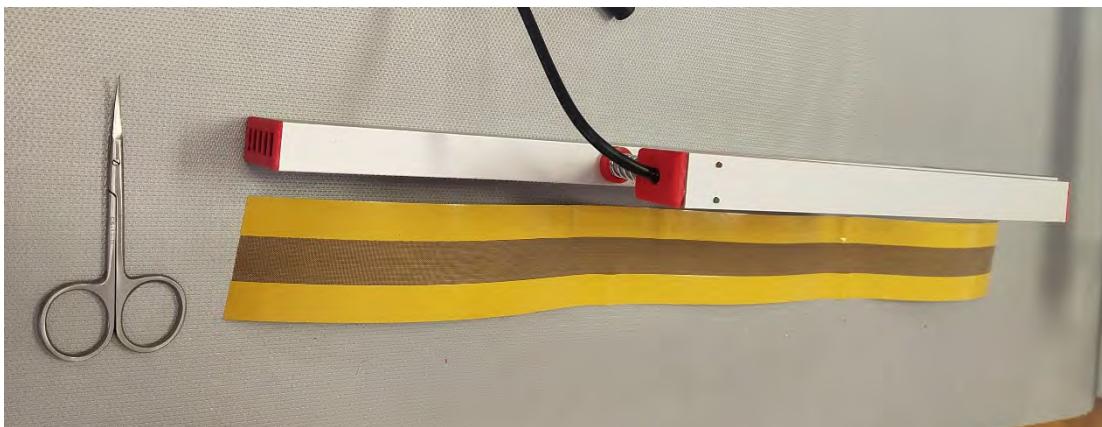

ставим iSeaer по центру между kleящимися полосами,



потом отрываем защитную пленку с одной стороны и наклоняем туда iSeaer,



прижимаем и потом то же самое с другой стороны.



Для черного:

Все тоже самое, только надо сначала всю защитную пленку снять.

1.2. Замена запаивающего лезвия



Рис. 1

Для того, чтобы заменить запаивающее лезвие, действуйте следующим образом:

- Отключите оборудование от электросети;
- Снимите тефлонированную ткань, нагрев kleящиеся стороны феном, если она не повреждена, то её можно будет наклеить повторно на двухсторонний скотч;
- Переверните запайщик ручкой вниз и потяните его вниз, взявшись за места (1и1) Рис.1;
- После нажатия рама крепления запаивающего лезвия (1) Рис.3 поднимется вверх и примерно посередине в раме вы увидите два технологических отверстия (1; 1.1) Рис.2 диаметром по 3 мм;
- Далее в них необходимо вставить подходящие по диаметру стержни (в ремкомплекте

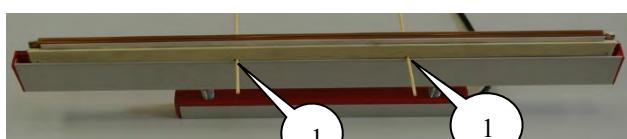


Рис. 2

они есть), чтобы зафиксировать раму в высокоподнятом положении над корпусом (см. Рис.2);

- Открутите гайку лезвия (2) Рис.3 специально приложенной отверткой с одной стороны;
- Поставьте запайщик вертикально, уприте один конец в поверхность стола и сожмите пружины;

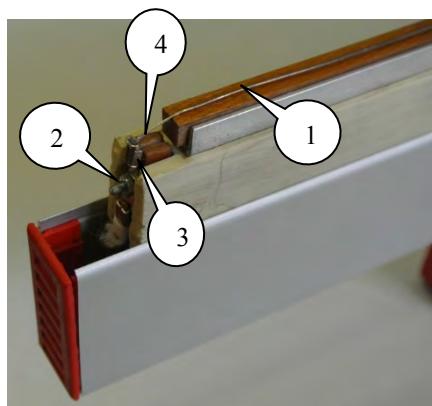


Рис. 3


- Снимите токоподводящую клемму(3) Рис.3;
- Снимите клемму нагревающего пружинного элемента (4) Рис.2;
- Проделайте тоже самое с другой стороны (запайщик можно не упирать и не зажимать пружину, т.к. после выполнения предыдущего пункта натяжения больше нет);

Установка нового лезвия

Установите новое запаивающее лезвие обратно по такому же принципу.


Более подробное описание замены запаивающего лезвия

Из ремкомплекта для замены лезвия нам понадобятся: никромовое лезвие, две гайки и две пружины. Торцевой ключ приложен в ремкомплекте. Плоскогубцами загибаем на лезвии ушки под прямым углом.


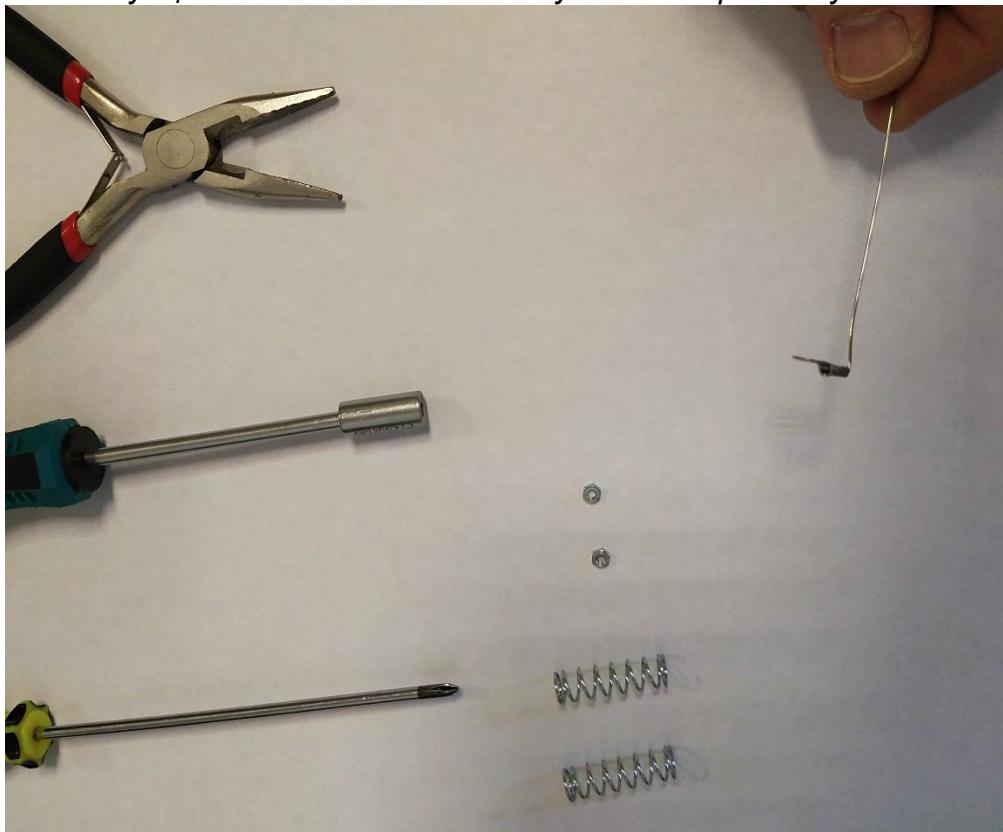


Выдвигаем основу устройства и фиксируем в этом положении с помощью двух стержней. Откручиваем старое лезвие. Если пружины не потерялись, их можно использовать в дальнейшем.

Осторожно придерживаем пружину. Устанавливаем как показано пружину.

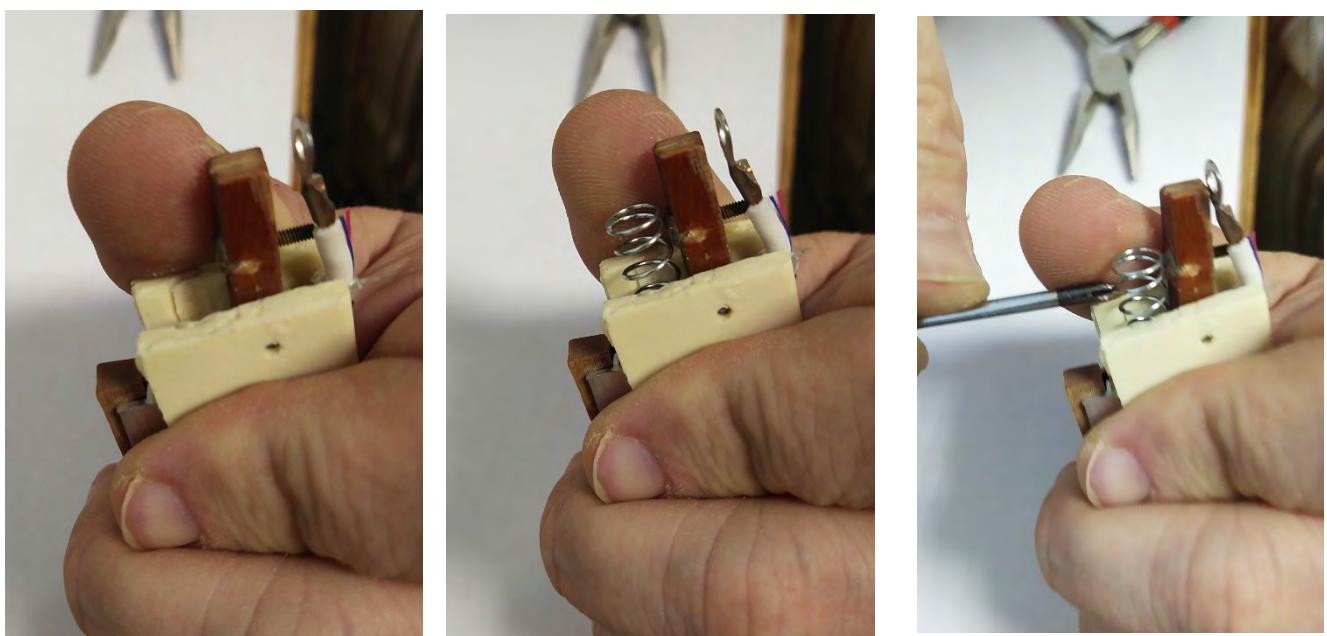

Фиксируем в сжатом положении пружину «качелькой» и контактами.

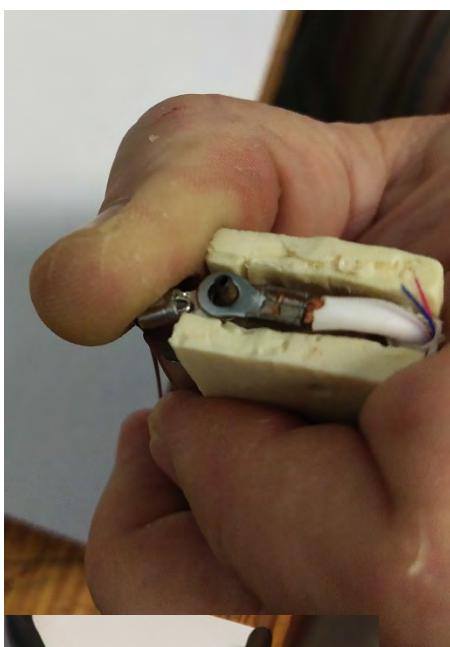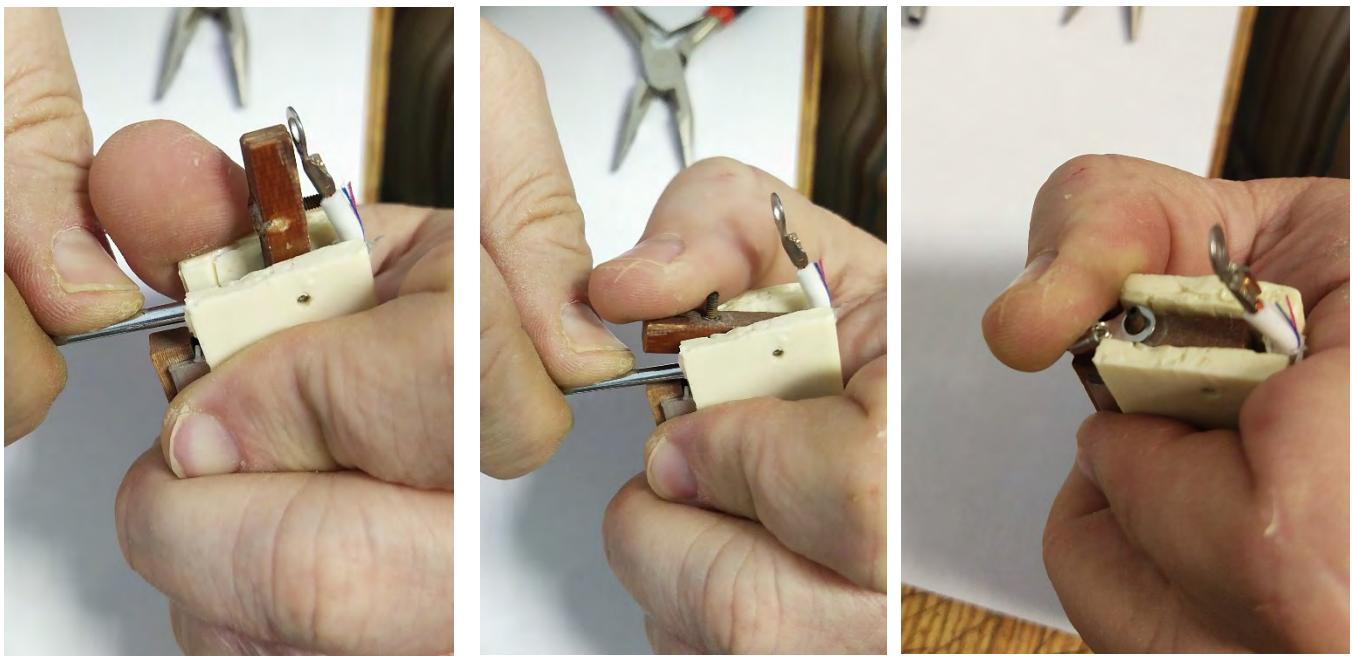

*Натягиваем лезвие.
Переворачиваем iSealer,
упирая его в стол уже
собранной стороной.*

*С обратной стороны
собираем в той же
последовательности.*



Когда все контакты встали на место, наварачиваем гайки с обоих сторон

